

服务热线：400-0566-301

ChenWei 晨伟

入选优秀国产医疗设备产品

麻醉系统 CWM-303

安全麻醉 舒适呼吸



关注微信公众号

南京晨伟医疗设备有限公司
地址：南京市江宁开发区胜太西路93号
电话：025-86989898-100 传真：025-57918626 邮编：211100
邮箱：njcw4497@sina.com 网址：www.chenwei-med.com

规格参数如有变动，恕不另行通知，产品内容以实物为准，本资料内容仅供参考。



主要功能特点

- 15英寸高清TFT彩色液晶触摸显示屏，180度全方位无色差
- 具有顶光灯照明功能，可满足特殊手术需求
- 简洁直观的用户界面设计，中文显示
- 气体模块插件式设计，可自动监测五种以上麻醉气体
- 全电子流量计控制更加精确
- 通气模式及参数调节触手可得，操作快捷简单
- 可同屏显示四道波形图和环形图
- 强大的监测和报警功能，保障手术安全
- 多功能网络接口，可连接院内外网络



全电子流量计，控制精确

采用全电子控制技术，无需机械旋钮调节，触屏操作，精确控制气体混合传输，氧气、笑气联动控制，操作方便快捷，可快速实现低流量麻醉，具有备用机械总流量计。

电子流量计调节范围：

O ₂	0 – 15 L/min
N ₂ O	0 – 15 L/min
Air	0 – 15 L/min



安全舒适的通气模式


智能精准的控制系统，先进的潮气量自动补偿功能和肺顺应性补偿功能，潮气量所设即所得，多种安全舒适的通气模式，容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、辅助控制通气（A/C）、压力支持通气（PSV）等，满足各种年龄段不同患者的通气需求。


压力保证同步间歇指令通气

压力目标型通气方式主要目的在于控制气道压力，减少肺损伤的可能性，但容易引起通气不足，而在该模式下，由于存在压力支持通气相，患者可以更大程度的发挥自主呼吸能力，避免通气不足的发生，保障患者安全。

压力调节容量控制通气

压力调节容量控制通气是将压力控制通气（PCV）和容量控制通气（VCV）有效结合起来的一种通气模式，可以在保证潮气量的同时尽可能地降低气道压力，能有效纠正急性呼吸衰竭，同时保护肺组织，避免气压伤。

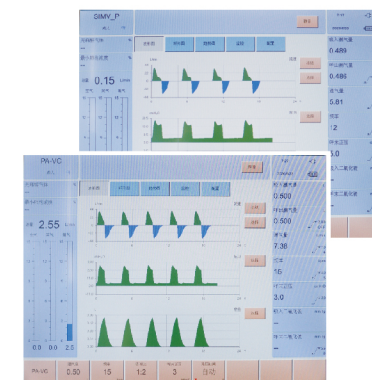

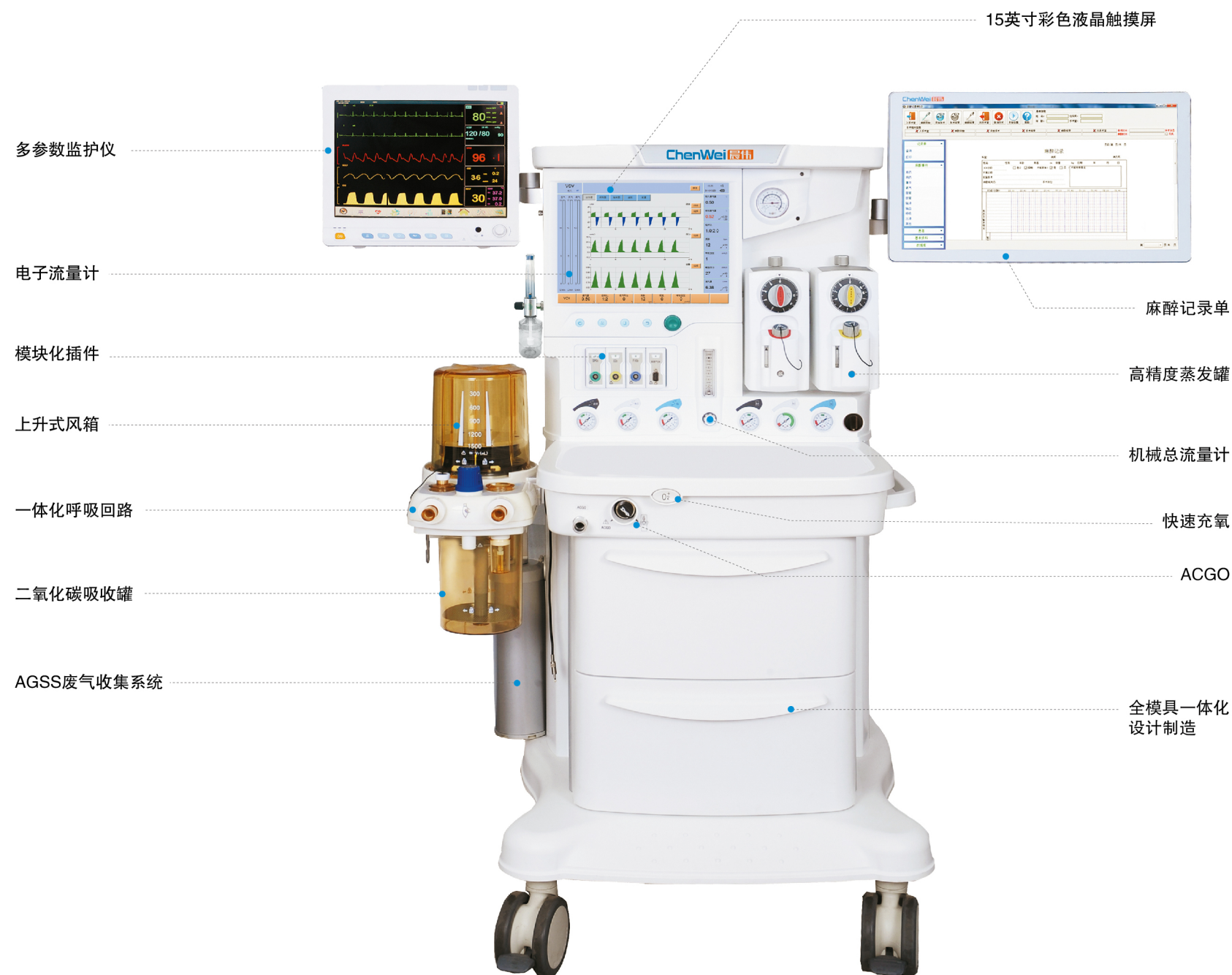

安全稳定，功能齐全的麻醉系统

CWM-303 数字化麻醉工作站，通过欧盟CE认证，适用于婴幼儿、儿童、成人。采用全模具化设计生产，核心部件选用进口知名品牌，智能化控制系统，完善、精准的气体输送系统，安全、舒适的通气性能，多种容量和压力通气模式的完美结合，可以为您提供麻醉工作所需的各种治疗方案，具有一体化的监测系统能监测所有与麻醉相关的参数及指标，可满足低流量及微流量麻醉。



先进的



安全的



精确的



可靠的


气体模块插件，方便灵活

- 气体模块插件设计，操作方便灵活
- 能自动识别监测五种以上麻醉气体浓度
- 可单独选配呼末二氧化碳CO₂监测
- MAC最低肺泡有效浓度监测，清晰直观显示



ACGO 接口

- 标准化设计，满足特殊需求
- 方便病人端的氧气吸入以及术后复苏
- 无需改装可直接与特殊开放式回路连接

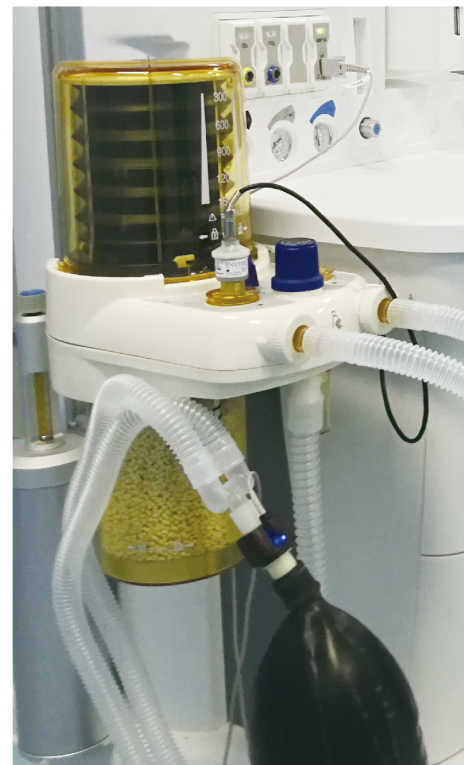

一体化呼吸回路设计

- 一体化呼吸回路，提供极好的密闭性和安全性
- 采用特殊材料制作，耐腐蚀、耐高温
- 结构紧凑，顺应性好，防积水设计
- 回路可耐134℃高温、高压消毒
- 吸入端和呼出端分别内置高精度传感器
- 直观的上升式风箱，随时捕捉患者呼吸变化
- 儿童麻醉时无需更换驱动风箱
- 大容量钠石灰罐，单罐结构拆卸更加方便



高精度蒸发罐

晨伟公司以先进的技术自主研发生产，质量达到进口蒸发罐的水平。

- 具有先进的温度、流量和压力自动补偿功能
- 用于低流量麻醉，更加节省麻醉用药
- 安氟醚、异氟醚、七氟醚等可供选择



AGSS 废气收集系统

麻醉废气排放容易污染洁净的手术环境，影响医护人员身体健康，晨伟公司自主研发生产的开放式排污系统能够为麻醉废气排放提供解决方案。

- 为手术室麻醉废气排放处理提供安全保障
- 利用中心负压泵产生的负压收集废气集中处理
- 降低手术室环境污染，确保医患人员安全

